

Description

Un kit de branchement de dialyse est un ensemble stérile d'instruments et de consommables spécialement conçu pour assurer un accès sécurisé au système de dialyse, tout en maintenant une hygiène optimale et en particulier le risque d'infections. Ce type de kit est utilisé pour les procédures de connexion et de déconnexion des patients nécessitant une hémodialyse.

Caractéristiques techniques

- **Type** : Dispositif médicale stérile à usage unique
- **Classification** : Classe IIa
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Sans latex** : Convient aux personnes allergiques au latex
- **Conditionnement** : 10 Set par Carton – 20 set par Carton – 50 Set par Carton

Référence

- PFM-DYZDRK1115



Conmedic groupe

Siège Social Allée des Cactus N°18 à Zone Industrielle Sidi Bernoussi


Z.I Ain Sebaa Allée des Orangers N°124-20600-Casablanca-Maroc

Showroom Casablanca - 88 lot OLFA extension RDC - 20220

05 20 32 32 40/41  05 20 49 49 80

www.conmedicgroupe.com

contact@conmedicgroupe.com

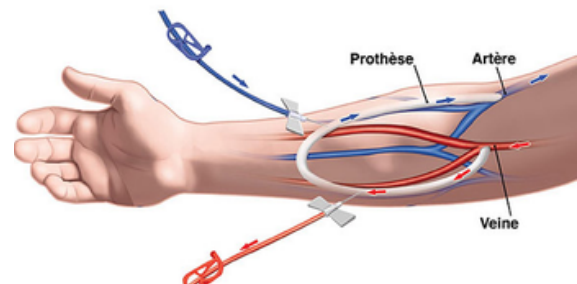

SETS DE DIALYSE DE BRANCHEMENT

GANTS EN VINYLE	taille S
ASQUE FACIAL AVEC ELASTIQUE	17,5 * 9,5 cm
TAMPON DE CHLORHEXIDINE	7 * 3 cm
CHAMP CHIRURGICAL	30 * 30 cm
COMPRESSE	8,3 * 6 cm
TAMPONS D'ALCOOL	70%
COMPRESSE NON TISSEE	10 * 10 cm 4 plis

Méthode d'utilisation

- Lavez soigneusement les mains avant l'ouverture des kits, en les immergeant dans une solution de thimérosol, puis séchez-les complètement.
- Ouvrez l'emballage stérilisé de manière à préserver l'intégrité de la stérilité.
- Disposez les articles de manière ordonnée sur un champ stérile, en respectant strictement les protocoles d'asepsie.
- Vérifiez que tous les éléments du kit sont présents et en bon état avant de les utiliser.

Conditions de conservation

- À stocker dans un endroit sec, propre, bien ventilé, à l'abri des matériaux corrosifs et des sources de chaleur.

Précautions d'emploi

- Le kit ne doit être ouvert qu'immédiatement avant l'intervention chirurgicale.
- Avant l'ouverture, vérifiez que le kit est bien scellé et ne présente aucune fuite.
- Assurez-vous que l'emballage stérilisé est intact et qu'aucune contamination n'a eu lieu.

Conditions de transport

- A manipuler avec soin pendant le transport et la manutention.


Certificat d'enregistrement N°25688/2024/12233-2024/DM/DPS/DMP/18

Conmedic groupe

Siège Social Allée des Cactus N°18 à Zone Industrielle Sidi Bernoussi

Z.I Ain Sebaa Allée des Orangers N°124-20600-Casablanca-Maroc

Showroom Casablanca : 88 lot OLFA extension RDC -20220

05 20 32 32 40/41  05 20 49 49 80www.conmedicgroupe.com contact@conmedicgroupe.com