



Description

La bande adhésive extensible non tissée, non stérile, offre une fixation douce et sécurisée. Perméable à l'air, elle assure une gestion optimale des échanges gazeux. Souple et extensible, elle s'adapte à toutes les zones, y compris les articulations. Non irritante et non sensibilisante, elle garantit une bonne tolérance cutanée et protège contre les fuites d'exsudats et autres liquides biologiques.

Référence

- PFM-BNDHYPNT01
- PFM-BNDHYPNT02
- PFM-BNDHYPNT03
- PFM-BNDHYPNT04
- PFM-BNDHYPNT05
- PFM-BNDHYPNT06
- PFM-BNDHYPNT07
- PFM-BNDHYPNT08

Caractéristiques techniques

- **Matériaux:**
 - Non tissé
 - Masse adhésive : Copolymères acryliques (haute tolérance cutanée) ;
 - Élément protecteur : Papier siliconé prédécoupé, imprimé avec quadrillage ;
 - Formule sans latex, sans phtalates.
- **Taille :** 5 m x 5 cm, 5 m x 10 cm, 5 m x 18 cm, 5 m x 20 cm, 10 m x 5 cm, 10 m x 10 cm, 10 m x 18 cm, 10m x 20 cm
- **Couleur :** Blanche
- **Grammage :** 160 g/m²
- **Conditionnement :** Par rouleau à découper dans une boîte individuelle.






Précautions

- Appliquer sans étirer.
- Ne jamais poser la bande directement sur une peau irritée ou lésée.
- Éviter l'emploi d'ammoniums quaternaires avant pose du dispositif.
- En présence de signes cliniques d'infection, consulter un professionnel de santé pour la mise en place d'un traitement approprié.
- Ne pas réutiliser pour éviter tout risque de contaminations croisées ou détérioration de la qualité du produit.
- Ne pas utiliser après la date d'expiration. Si le produit est utilisé après la date d'expiration, ses performances ne sont plus garanties

Domaines d'utilisation

- Santé / Médical / Dermatologie / Soins généraux/ Traitements ambulatoires

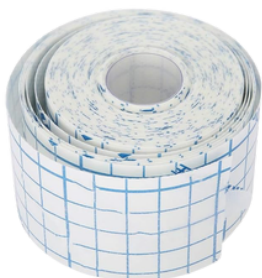

Indications d'utilisation

- Appliquer sur peau sèche et propre.
- Découper la taille nécessaire grâce aux repères gradués tous les 10 cm.
- Séparer les deux feuillets protecteurs en étirant légèrement les deux bords .
- Enlever le plus petit feuillet.
- Appliquer la partie adhésive du bande sur la peau propre et sèche et retirer le deuxième feuillet protecteur.
- Appliquer doucement l'autre partie adhésive, sur toute sa surface pour obtenir une adhésion complète.

Conditions de conservation

- À stocker dans un endroit sec et frais (25°C) , à l'abri de la lumière.

Certificat d'enregistrement N° :
25729/2024/11134-2024/DM/DPS/DMP/18

