



## Description

- Dispositif médical à usage unique essentiel pour assurer un bon niveau de protection contre les infections oculaire
- Douce et non irritante pour la peau autour de l'œil
- Haute capacité d'absorption des sécrétions oculaires
- Utiliser dans le traitement des affections oculaires et dans les soins post-opératoires
- Ne laisse pas de résidu désagréable sur la peau et non adhésive
- Une compresse adaptée à l'anatomie de l'œil avec une surface lisse, non pelucheuse, et sans bords effilochés



## Référence

- PFM-CMPOS01
- PFM-CMPOS02
- PFM-CMPOS03
- PFM-CMPOS04
- PFM-CMPOS05

## Caractéristiques techniques

- **Matériel:** Coton hydrophile
- **Taille :** 5,3\*6,6 cm - 5,5\*7,5 cm - 7\*5,6 cm - 6\*8 cm - 9,5\*6,5 cm
- **Forme :** Ovale
- **Couleur :** Chair
- **Méthode de stérilisation :** Oxyde d'éthylène (ETO)
- **Conditionnement :** Boite de 20 pièces
- **Emballage :** Individuellement emballées pour assurer l'intégrité et l'hygiène du produit
- **Durée de vie :** 5 ans
- **Biocompatibilité :**
  - Index de cyto-toxicité : cyto-toxicité minimale
  - Index d'irritation oculaire (lapin) : irritation minimale
  - Sensibilisation sous-cutanée : absence d'allergie de contact
  - Irritation cumulative : pas d'allergie de contact



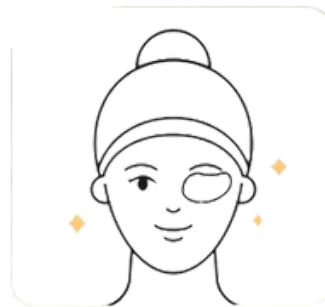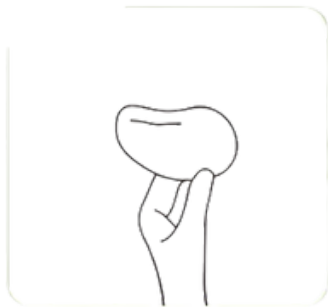

## Précautions

- Utilisez une compresse oculaire stérile pour chaque œil afin d'éviter toute contamination croisée.
- Ne réutilisez pas les compresses oculaires stériles.
- Ne touchez pas la surface de la compresse avec vos doigts pour éviter toute contamination.
- En cas d'irritation ou d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser les compresses oculaires stériles et consultez un professionnel de la santé.

## Indications d'utilisation

- Lavez-vous les mains avant de manipuler les compresses oculaires stériles.
- Ouvrez l'emballage et retirez une compresse en évitant la contamination.
- Appliquez la compresse sur l'œil affecté en assurant une couverture complète.
- Laissez en place pour le temps recommandé par un professionnel de la santé ou les instructions du produit.
- Jetez la compresse utilisée de manière appropriée.

## Domaines d'utilisation

- Industrie / Santé / Médical / Soins personnels et hygiène / Habillement / Filtration / Agriculture

## Conditions de conservation

- Stockez dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe pour éviter la dégradation.

**Certificat d'enregistrement N° :**  
**25718/2024/11135-2024/DM/DPS/DMP/18**

